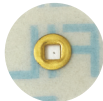
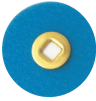


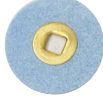


GUÍA DE PULIDO DE COMPOSITOS

Cosmedent le ofrece todo lo que necesita para pulir. Con nuestros pulidores fáciles de usar y convenientemente codificados por colores, puede crear un pulido suave y estético que imita el esmalte a largo plazo.

Herramienta de pulido	Rango de velocidad	Notas de uso	Tamaño
FlexiDisc® Coarse 	De 3.000 a 15.000 RPM para disco de 3/8" De 5.000 a 15.000 RPM para los demás tamaños	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicar poca presión • Gran desgaste • Contorneado inicial • Pulido de imperfecciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en tres tamaños: 1/2", 5/8", & 3/4"
FlexiDisc® Medium 	De 3.000 a 10.000 RPM alrededor del margen gingival con disco de 3/8". De 10.000 a 15.000 RPM para los demás tamaños	<ul style="list-style-type: none"> • Finalización del contorneado • Eliminación de rayas • Flexionar y presionar 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en tres tamaños: 1/2", 5/8", & 3/4"
FlexiDisc® Fine 	De 10.000 a 15.000 RPM para todos los tamaños	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio del pulido final • Flexionar y presionar 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en tres tamaños: 1/2", 5/8", & 3/4"
FlexiDisc® Superfine 	De 10.000 a 15.000 RPM para todos los tamaños	<ul style="list-style-type: none"> • Mejora del pulido final • Flexionar y presionar 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en tres tamaños: 1/2", 5/8", & 3/4"
FlexiBuff® 	15.000 RPM para todos los tamaños	<ul style="list-style-type: none"> • Añadir Enamelize® al diente primero y aplicar presión 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible en tres tamaños: 1/2", 5/8", & 3/4"