

# Creative Color® Pink Opaque



## Instrucciones de Uso

### Almacenaje

- Una vez abierto, no refrigerar.
- Almacenaje entre 39 - 75° F (4 - 24 ° C).
- Caducidad: ver información acerca de las jeringas y / o envasado.
- Evitar la luz solar directa.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilizar después de la fecha de caducidad

### Referencias

Repuestos Pink Opaque REF # 6031-P0  
Jeringas Individuales: 2,5 gr. cada una

### Información Importante del Producto

Las leyes federales de Estados Unidos, restringen la venta de este producto. Solo se vende a dentistas o por orden de un dentista.

**Nota:** Este producto ha sido fabricado para utilizarse en el sector dental, de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños causados por su utilización para otros fines. El usuario está obligado a aceptar su responsabilidad de comprobar antes de utilizarlo, que el material está en perfectas condiciones para la finalidad indicada, particularmente si no está en la lista de instrucciones de uso.

**Contraindicaciones:** Pink Opaque está contraindicado si se sabe que el paciente es alérgico a cualquiera de los componentes del Pink Opaque. El Pink Opaque debe estar cubierto por un composite de microrelleno dental.

**Interacciones:** No utilizar en combinación con materiales que contengan eugenol, ya que impedirían el proceso de polimerización.

**Nota:** Durante el tiempo que duran los procedimientos, evite sobre-exponerlo ante la luz de la operatoria, para proteger el material ante la polimerización.

**Precaución:** Renamel Pink Opaque contiene 1,4 butanodiol dimetacrilato. Causa irritación en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Use guantes de protección. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.

## Características Generales

Pink Opaque™ ha sido desarrollado para enmascarar cambios de color marrón oscuro o gris extremadamente oscuro debido a manchas por tetraciclina, dientes desvitalizados antiestéticos y metales. A diferencia de otros opacificadores, Pink Opaque tiene la capacidad de neutralizar los colores muy oscuros, mientras que, naturalmente, incrementa el valor con calidez (blanco opaco no va a hacer esto). Pink Opaque se polimeriza con luz LED y con luz halógena en el rango de longitud de onda de 400 - 500 nm.

## Indicaciones de Uso

Enmascarar cambios de color marrón oscuro o gris extremadamente oscuro debido a manchas por tetraciclina, dientes desvitalizados antiestéticos y metales.

## Instrucciones de Colocación

1. Aplicar el adhesivo elegido y polimerizar.
2. En áreas grandes, se recomienda impregnar la superficie preparada con una fina capa de Clear Liquid Resin para romper la tensión superficial.
3. Aplicar Pink Opaque™ en capas delgadas para bloquear el color no deseado y mezclar en la estructura dental existente, polimerizar durante 40 segundos por capa.
4. Continuar con la aplicación de la resina restauradora.

Dentistry and Photography by: BUD MOPPER, D.D.S., M.S.

V03, 2015-05-26

## Símbolos utilizados en el etiquetado Internacional

CE COMUNIDAD EUROPEA	REF NUMERO DE CATALOGO
FECHA DE CADUCIDAD	TEMPERATURA DE ALMACENAJE RECOMENDADA
DESCRIPCION DEL LOTE	CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO
FABRICANTE	PROTEGER EL PRODUCTO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA
INFORMACION IMPORTANTE DEL PRODUCTO: Las leyes federales americanas restringen la venta de este producto y puede ser vendido solo a dentistas.	PRECAUCION

Manufacturado por:  
Cosmedent, Inc.  
401 N. Michigan Ave.  
Suite 2500  
Chicago, IL 60611-4243  
US (1) 800-621-6729  
US (1) 312-644-9586  
www.cosmedent.com

Fabricante:  
DeltaMed GmbH  
Raiffeisenstrasse 8a  
61169 Friedberg  
Germany  
www.deltamed.de

0124

www.sasexclusivasdentales.es

96 331 81 10

**COSMEDENT®**  
*Spreading Smiles®*

Smiling Patients, Smiling Dentists.

Committed to better patient care with quality products and dedicated support.