


Guía de inicio rápido de Compex HD

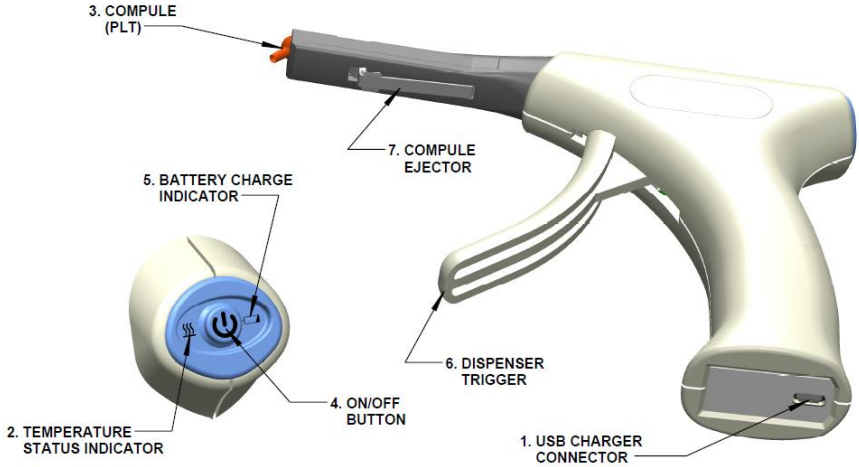

1. Conecte el cargador USB y cargue completamente el dispensador Compex antes de utilizar la unidad.
2. El Indicador de Carga de Batería pasará de rojo intermitente a verde sólido. Desconecte el cargador.
3. Inserte un compule (PLT) en la apertura del cañón
4. Inicie el ciclo de calentamiento presionando una vez el botón ON/OFF.
5. Espere hasta que el Indicador del Estado de la Temperatura pase de amarillo intermitente a verde sólido.
6. Dispense el composite apretando el gatillo.
7. Retire el compule presionando hacia abajo en la porción elevada del eyector del compule.
 - Para calentar compules adicionales, inserte un nuevo compule (PLT) y presione una vez el botón ON/OFF
 - Para apagar la unidad, presione y mantenga durante 1,5 segundos el botón ON/OFF.
 - Consulte las Instrucciones de Uso para obtener Información adicional e instrucciones de limpieza/desinfección/esterilización.